

DiosolGenerator - Vorgehensweise Kaltnebel-Verfahren:

Das kostengünstige Dekontaminationsverfahren

Kurzanleitung und Sicherheitshinweise

Die im Folgenden skizzierte Vorgehensweise zur Anwendung des **DioProtection** ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Lesen Sie diese vor Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und halten Sie sich strikt an die beschriebenen Vorgaben.




1. Raumvolumen errechnen



2. Erstellen eines DioProtection-Plans




3. Gerät an den Rand des Raumes schieben und einschalten

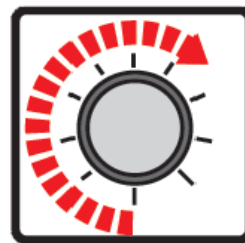

4. Mengenregler auf Raumvolumen einstellen



5. Fenster und Türen schließen, Raum innerhalb 30 sec verlassen

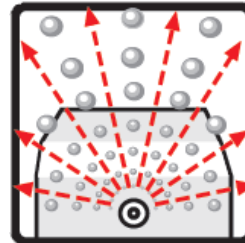

6. DioProtection-Vernebelung



7. 90 min lang nach Aktivierung des Gerätes den Raum nicht betreten



8. Danach ist die Desinfektion rückstandslos abgeschlossen